


makuga® VIBE

IHRE VIBRATIONS-MASSAGE
FÜR ALLE KÖRPERZONEN

• Nacken und Schulter

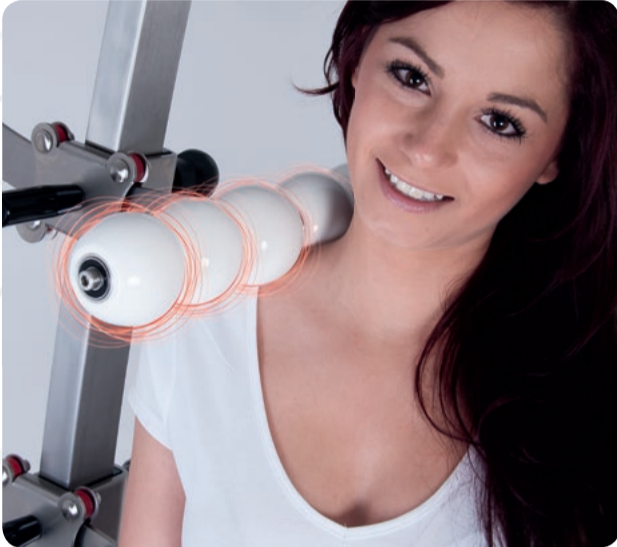


• Oberer Rücken



• Lende



• Gesäß

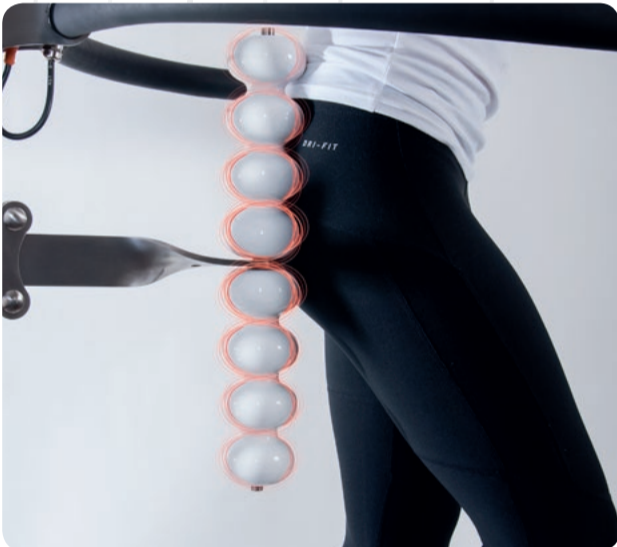

• Beine, innen und außen



• Wade



Hinweise und Erklärungen:

Bei Verwendung der makuga® Wellnessprodukte empfehlen wir eine Einweisung durch ausgebildete Fachleute. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte nicht die Behandlung durch medizinische Fachkräfte ersetzen.

Kontraindikationen: Verwenden Sie die Geräte nicht bei Schwangerschaft, Fieber, Infektionskrankheiten, konsumierenden Prozessen, Operationen, neurologischen Ausfällen, Therapien mit Gerinnungshemmern sowie Herzrhythmusstörungen.

Massagekörper nicht in direkten Kontakt mit Knochenvorsprüngen bzw. Wirbelsäule oder Kopf bringen.

Um mögliche unerwünschte Effekte zu vermeiden, empfehlen wir bei bestimmten Umständen, makuga® vibe mit eingeschalteter Vibration zunächst zurückhaltend einzusetzen. Im Falle folgender medizinischer Umstände bitten wir Sie, vor Benützung der Geräte Ihren Arzt zu konsultieren:

- akuter Bandscheibenvorfall
- akute Entzündungen
- Herzschrittmacher

- akute Thrombose
- kürzlich angebrachte Metallstifte
- Hüft- oder Knieimplantate
- frische Frakturen (Knochenbrüche)
- Osteoporose 3. Grad
- akute Sehnenerkrankung
- Tumore
- Gallen- und Nierensteine
- frischer Herzinfarkt
- Diabetes
- Epilepsie
- Arthrose
- Spirale
- Krampfadern
- Stents

Wir wünschen Ihnen einen entspannten Tag!

www.makuga.com